


Použití ochrany před ušním mazem


Ochrana před ušním mazem - filtr, pomáhá chránit sluchadlo před ušním mazem.

Pravidelně kontrolujte, že filtr není zanešen ušním mazem, a to následujícím způsobem:

Nejprve odstraňte ušní koncovku z hadičky. Pokud se ve filtru nahromadil maz, vyměňte jej.

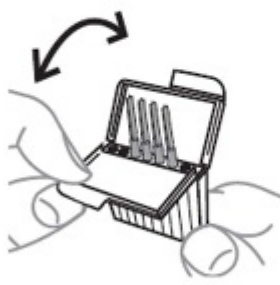


Otevřete krabičku filtrů jak je uvedeno na obrázku.

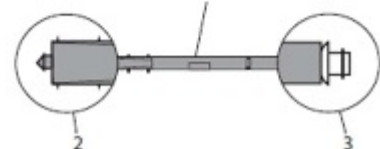


Filtr tvoří následující součásti:


1. Držák
2. Vyndávací háček
3. Ochrana před ušním mazem - filtr

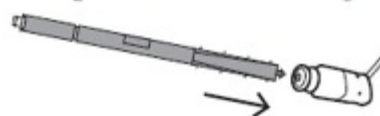


Zasuňte odstraňovací háček do znečištěného filtru.

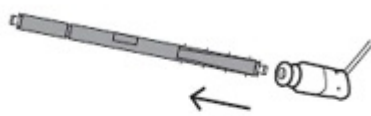

Vytáhněte použitý filtr rovně ven.

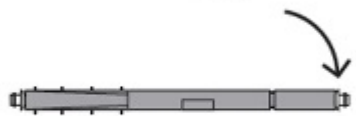

Otočte držák čistým filtrem ke sluchadlu.

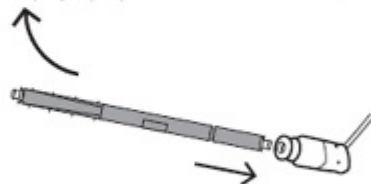

Vložte nový filtr do zvukového výstupu. Vytáhněte držák rovně ven. Nový filtr se automaticky odpojí od držáku. Zatlačte filtr opatrně proti povrchu, abyste se ujistili, že je správně nasazen. Nasadte ušní koncovku zpět na hadičku.

